



Debussy  
Thermodermie®

# THERMODERMIE® DEBUSSY

## PROCEDE UNIQUE ET NATUREL

### UTILISATION ESTHETIQUE

#### TRAITEMENTS PAR PROCHES INFRAROUGES :

- Traitement de la cellulite et diminution des surcharges pondérales,
- Initie les réactions de lipolyse de manière naturelle
- Traitement des vergetures
- Traitement des rides, du relâchement de l'ovale du visage, décolleté
- Stimulation naturelle du collagène et des fibroblastes, apportant
  - Tonification et raffermissement des tissus,
  - Diminution de la douleur et détente musculaire

#### AMINCISSEMENT :

**Perte moyenne d'une taille en 5 séances (Etudes du docteur Blairvacq).**

Par son action de massage, associée au faisceau infrarouge, la Thermodermie permet de revasculariser les adipocytes sous cutanés, agissant ainsi :

- Action sur la circulation sanguine
- Décongestion des dépôts cellulitiques
- Activation du système lymphatique
- Activation de la microcirculation
- Déstockage des acides gras (lipolyse)
- Fonte des amas graisseux
- Relargage du cholestérol et des métaux lourds
- Régénération tissulaire
- Libération des cellules adipeuses permettant un **amincissement spectaculaire en 5 jours (une semaine) !**

#### RAJEUNISSEMENT DU VISAGE :


La technique de la Thermodermie Debussy consiste à stimuler la production de collagène via la lumière proche infrarouge, à rétablir une bonne oxygénation des tissus, à y effectuer un drainage lymphatique, et à re-tonifier les fibres détendues.

- Les rides s'estompent,
- L'ovale du visage se tonifie,
- Le décolleté est lissé

Apportant un rajeunissement réel et durable !

#### CONDITIONS :

Garantie 2 ans - Formation incluse

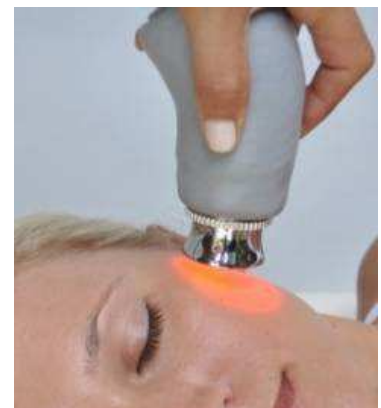


## MODELE DEBUSSY 100 W

- Appareil sans ultrasons
- Équipé d'ampoules infrarouges 100 w corps
- Et 75 w pour le visage
- avec tous ses accessoires : filtres, embouts, coupoles



## OPTION ultrasons

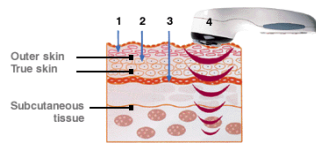

2 sondes ultrasoniques :

- 1 sonde 1 mhz pour le corps
- 1 sonde 3 mhz pour le visage

## MODELE DEBUSSY 200 W pulse (lampe flash)

- Equipé d'ampoules infrarouges 200 w corps
- et 75 w pour le visage
- Système pulse avec ou sans capteur de température pilotant de manière automatique le système



## MODELE DEBUSSY 200 w pulse avec capteurs de température + LIPOSONIC intégrée (2 en 1)

- Même appareil que ci-dessus
- Livré avec tous ses accessoires,
- **sans** ultrasons 1 et 3 mhz
- avec l'appareil LIPOSONIC à Lipocavitation intégré
- équipé d'une sonde visage et corps de 1 mhz
- et d'une sonde corps de 40 Hz



## LIPOSONIC® by DEBUSSY

### TRAITEMENTS PAR ULTRASONS – LIPOCAVITATION :

Les ultrasons sont des vibrations qui engendrent un phénomène de chaleur et de cavitation, que l'on appelle ultrasonolipolyse. Utilisés dans le traitement de la cellulite, ils permettent un résultat rapide sans effet secondaire. Les ultrasons « vidangent » progressivement les cellules graisseuses tout en douceur, sans risque de lésion pour la peau.

Les ultrasons induisent :


- Un amincissement des zones traitées
- une diminution des tissus fibrosés et durs (micro nettoyage)
- Une stimulation de la vascularisation
- Un micro-massage des tissus
- Une détente musculaire
- Une meilleure pénétration des crèmes et des gels

*La Lipocavitation, seule ou associée à la Thermodermie Debussy, est la technique actuelle la plus efficace pour le traitement de la cellulite et des graisses localisées !*


#### LA SONDE LIPOSONIC 40 kHz EN ACTION :



*Pose d'une noix de beurre*

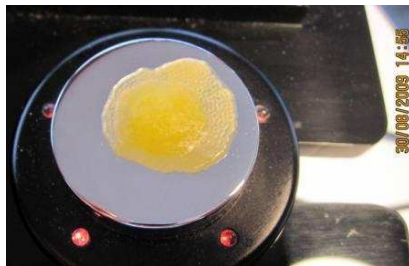

*Après 20 secondes ...*

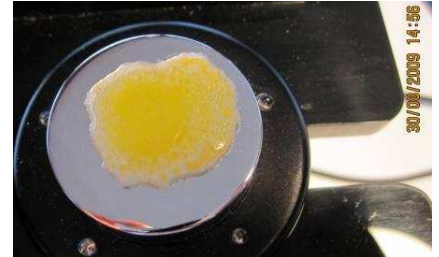

*Après 40 secondes !*

#### LIPOSONIC® by DEBUSSY

Appareil livré avec :

- Une unité centrale
- 1 sonde ultrasonique corps, puissance 40 kHz
- 1 sonde corps et visage, puissance 1 MHz
- 1 pédale d'alimentation
- 1 carte d'accès



<b>D 100</b>	<b>APPAREIL DEBUSSY 100 w</b>	
<b>D 150</b>	<b>APPAREIL DEBUSSY 150 w PULSE</b>	
<b>D 200</b>	<b>APPAREIL DEBUSSY 200 w PULSE et PILOTE</b>	
<b>C 200</b>	<b>CONCEPT DEBUSSY 200 W D200 + L50 intégrés</b>	
<b>L50</b>	<b>APPAREIL LIPOSONIC</b>	<b>50 W</b>
<b>L25</b>		<b>25 W</b>
<b>US OPTION</b>	<b>MINICAPTEURS US 1 MHz et 3 MHz</b>	
<b>PV</b>	<b>PALETTE VIBRANTE</b>	
<b>Packs spécifiques : Debussy + Liposonic séparés sur devis</b>		